


V32/V33系列二线IP网关说明书

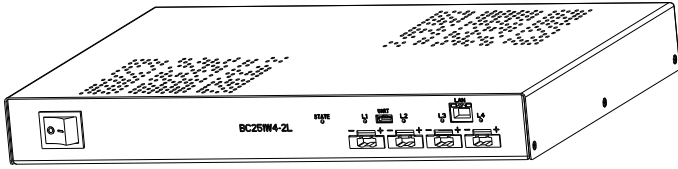

欢迎选用我公司的二线IP网关产品！

本产品采用当今最先进的电子通信技术设计，以优良的SMT工艺生产，经过严格的质量保证体系的测试与检验，具有高集成度、高可靠性、高性价比等特点，为值得信赖的医护产品。

级（由工程实施人员导入到设备中）为新的房号表，房号表中每个房号都有一个对应的IP地址，升级房号表可能需要重新设置房号。

3.2服务器设定

医护平台IP默认为：192.168.99.252；医护平台端口默认为：28088；租户编码默认为：10000；登录帐号默认为：02_01000005；登录密码默认为：071419；设置完成点击保存后，设备重启。

3.3修改登陆密码

登陆密码是二线IP网关的参数设置页面的登陆密码。在“旧密码”中输入旧的密码，在“新密码”中输入新的密码，在“确认新密码”中再次输入新的密码，点击【保存】即可完成密码修改。当再次访问参数设置页面时，请以新密码进行登陆。

3.4系统还原

系统还原功能就是将系统参数设置还原为出厂时的设置，请慎用该功能！

3.5系统信息

系统信息功能就是在页面上显示IP网关的相关信息，包括硬件版本、软件版本、固件版本、IP地址、MAC地址等。

四、技术参数

产品型号	BCL251W4-2L
供电电源	AC220V
供电电压	AC220V
最大功耗	1500W（满负载支持，非实际情况）
工作温度	-10°C to 50°C
工作湿度	10% to 95%
联网接口	RJ45 10M/100M
安装方式	桌面
整机尺寸	383*281*47mm
预埋盒尺寸	-


五、故障分析与排除

如系统不正常，断电后请按《简单故障排除表》逐一检查。如未查明故障原因，请通知代理销售商或厂家，不可自行打开修理或更换元件而造成系统损坏。

装箱清单（表中配件可能根据型号不同而有所增减）

序号	名称	数量	
1	二线IP网关	1台	
2	说明书	1本	
3	合格证	1张	
4	配件包	1套	配件包单独包装，内含：挂板、电源线、电源适配器、配线等。不同型号产品配件包可能有所不同，以实物为准。

一、产品介绍

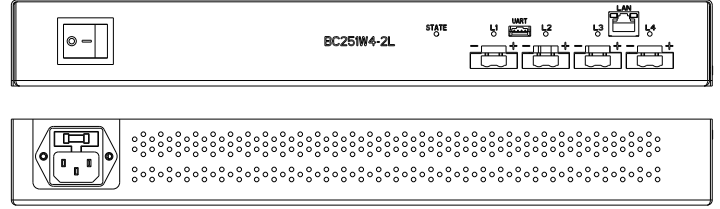

二、安装说明

将IP网关放置在水平的平面位置上即可。产品在安装过程中，需根据实际应用情况，将对外接口端子与外部设备进行连接。连接时，请确认产品的电源线，网线，以及对外接口端子与外设的正确连接。

三、产品设置

产品接上电源启动后，将IP网关和电脑连接到同一个网段的局域网中，使电脑能正常访问该IP网关。在电脑上打开浏览器，访问默认的IP：192.168.99.155，如果连接成功，会弹出对话框：输入用户名：admin，密码（初始密码是admin）登录到系统中。

3.1基本设定

在基本设定页面中，可以对IP网关的本机号码进行设定。在“本机号码”输入框中输入相应的房间号（设备编号）（请遵照房号导出表的数据进行设置，不要随意输入其它号码），点击【保存】按钮，IP网关将会自动重启。

根据客服提供的房号导出表，把本机号码修改为新的房号，点击【保存】按钮即可，之后系统会重新启动，应用新的房号设置。新的房号对应的IP地址请在房号导出表中查找。

注：设备出厂时已内置通用房号表（一个设备可识别的二进制文件），也可根据项目实际需要升

简单故障排除表

序号	故障现象	故障原因分析	排除方法
1	电源灯(开关)不亮	电源不通	检查电源线的两端是否插好，有没有松动接触不良
2	与网关连接的设备无电源供应	四路网关插头接触不良	关闭二线IP网关电源后，重新插拔相关插头
3	网关的网口灯不亮	网络故障	检查网络是否正常，网线是否插到位等

为维护您的权益，请您认真填写，并妥善保管，作为维修时的凭证：

产品保修卡——用户存根

经销商信息	经销商名称	
	联系电话	
	产品型号	
	产品编号	
	销售日期	
用户信息	用户名称	
	联系电话	
	通讯地址	
	E-mail	

产品保修卡——经销商存根

经销商信息	经销商名称	
	联系电话	
	产品型号	
	产品编号	
	销售日期	
用户信息	用户名称	
	联系电话	
	通讯地址	
	E-mail	